

ACRA-GUN / ACRA-CLIPS



REFERENCES


ACRAGUN :

500-100 ACRAGUN AVEC BOITE DE STERILISATION - REUTILISABLE
 500-135 ACRA - CUT PINCE A CLIP - REUTILISABLE



ACRACLIPS :

500-103 2 BARRETTES DE 15 - BORD DROIT - FORCE DE CLAMPAGE "IMPORTANTE" - COULEUR VERT - ADULTE
 500-104 2 BARRETTES DE 15 - BORD DENTELE- FORCE DE CLAMPAGE "LEGERE" - COULEUR JAUNE - PEDIATRIQUE
 500-105 2 BARRETTES DE 15 - BORD DENTELE - FORCE DE CLAMPAGE "MOYENNE" - COULEUR BLEU - ADULTE
 500-106 2 BARRETTES DE 15 - BORD DENTELE- FORCE DE CLAMPAGE "IMPORTANTE" - COULEUR VERT - ADULTE
 500-108 1 BARRETTE DE 15 - BORD DROIT - FORCE DE CLAMPAGE "MOYENNE" - COULEUR BLEU - ADULTE
 500-109 1 BARRETTE DE 15 - BORD DROIT - FORCE DE CLAMPAGE "IMPORTANTE" - COULEUR VERT - ADULTE
 500-110 1 BARRETTE DE 15 - BORD DENTELE - FORCE DE CLAMPAGE "LEGERE" - COULEUR JAUNE - PEDIATRIQUE
 500-111 1 BARRETTE DE 15 - BORD DENTELE - FORCE DE CLAMPAGE "MOYENNE" - COULEUR JAUNE - ADULTE
 500-112 1 BARRETTE DE 15 - BORD DENTELE - FORCE DE CLAMPAGE "IMPORTANTE" - COULEUR VERT - ADULTE

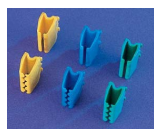

AVANTAGES

- * AGRAGUN - ADAPTATION A N'IMPORTE QUELLE TAILLE DE MAIN
- * AGRAGUN - APPLICATION DES CLIPS RAPIDE - SOUS PLUSIEURS ANGLES - MÊME A L'ENVERS AVEC UN CONTRÔLE COMPLET
- * AGRAGUN - QUATRE PIÈCES EN MOUVEMENT POUR UNE FIABILITÉ MAXIMALE
- * ECONOMIQUE - PISTOLET RÉUTILISABLE AVEC LA COMMODITÉ DES BARRETTES STÉRILES PRÉCHARGÉES
- * LIBÉRATION RAPIDE ET FACILE DES CLIPS DANS LE PISTOLET
- * SERRURE DE BARRETTE INTEGRALE - ELIMINE L'EJECTION DE CLIPS NON CONTRÔLÉE
- * ACRACLIPS - DISPONIBLES AVEC DES BORDS DENTELES OU DROITS - UN CHOIX DE TROIS FORCES DE CLAMPAGE

UTILISATION

AGRAGUN EST FACILE D'UTILISATION

AGRAGUN EST FACILE À CHARGER



1 - METTRE EN PLACE LA BARRETTE STERILE PRECHARGÉE DANS L'AGRAGUN



2 - VÉRIFIER LA MISE EN PLACE DE LA BARRETTE - LE PREMIER CLIP EST PRÊT À L'EMPLOI



1 - PRESSER LA GÂCHETTE POUR OUVRIR LE CLIP



2 - APPLIQUER LE CLIP AU SCALP



3 - AGRAGUN PEUT APPLIQUER LES CLIPS SOUS N'IMPORTE QUELS ANGLES - MÊME À L'ENVERS



4 - RELÂCHER LA GÂCHETTE POUR LA FERMETURE DU CLIP. LE PROCHAIN CLIP GLISSE EN POSITION PRÊT À APPLIQUER

ACRACLIPS - BARRETTE SIMPLE OU DOUBLE BARRETTE STERILE



AGRAGUN - BOÎTE DE STOCKAGE ET DE STÉRILISATION PROTECTRICE

