



Protège-toi

Enlèvement sûr de lame

▲ Les blessures oubliées dues aux objets tranchants

Les blessures par scalpel sont 200 fois plus susceptibles de se produire que celles dues aux aiguilles. Elles sont particulièrement fréquentes dans les cadres chirurgicaux. Malheureusement, de nombreux utilisateurs et administrateurs cliniques ont sous-estimé la probabilité de telles blessures.

Les coupures dues aux scalpels peuvent arriver à tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre expérience dans le maniement des scalpels. Ces coupures peuvent entraîner des infections, des maladies transmises par le sang et une détresse psychologique. D'autres blessures graves peuvent imposer une microchirurgie afin de réparer les artères, les nerfs et les tendons digitaux.

De nombreuses blessures par scalpel peuvent aisément être évitées grâce au BladeFLASK Qlicksmart, le premier extracteur de lames une main au monde.



▲ L'extracteur de lames primé



Les BladeFLASK Qlicksmart ont extrait en toute sécurité plus de 70 millions de lames de scalpels contaminées et évité jusqu'à 165 000 blessures au niveau mondial.



Le BladeFLASK est facile à utiliser avec une action rapide « pousser, cliquer et tirer » pour extraire et protéger les lames de scalpel usagées.



Cette solution facile à utiliser constitue une alternative plus économique aux scalpels de sécurité.



Utilisé avec la remise d'instruments sans mains, le BladeFLASK peut éviter jusqu'à 5 fois plus de blessures qu'un scalpel de sécurité.



Le BladeFLASK permet aux utilisateurs de lames de scalpels de conserver leurs préférences pour les manches métalliques standards.



Le BladeFLASK a reçu de nombreuses récompenses, ce qui prouve son aspect pratique et son efficacité dans la réduction des blessures dues aux scalpels.

La sécurité sur le lieu de travail constitue le droit de tous les professionnels de santé et la responsabilité de tous les employeurs.

Utilisez le BladeFLASK Qlicksmart et protégez-vous.

BladeFLASK

100 | Système d'extraction de lames de scalpel

QLICKSMART®
... et protégez-vous

Spécifications

Version couleurs	Rouge - USA Jaune – pour tous les autres pays
Référence produit	QFRGEN – version rouge QFYGEN – version jaune (boite de 24 unités)
Code GMDN	46235
Capacité	100 lames – se bloque automatiquement lorsque la capacité maximale est atteinte
Lames & manches compatibles*	Manches: #3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, Lawton manche long Lames: #10, 10a, 11, 12, 13, etc. jusqu'à #25a, 27 et 36 inclus.
Lames & manches incompatibles	Manches Baron, manches Beaver, manches à usage unique
Dimension (unité)	Longueur 11cm , Largeur 9cm , Hauteur 14cm
Poids (unité)	Approximativement 250g
Accessories	Support de montage – maintient le BladeFLASK en place permettant l'extraction des lames à une main

Matériau	Corps: Acrylonitrile-butadiène- styrène (ABS) Mécanisme interne: Polyacetal (POM)
Latex	Non
DEHP	Non
Sterile	Non
Réutilisable	Multi-usage – extrait 100 lames avant élimination
Mode d'élimination	Comme déchet médical – veuillez respecter les procédures de votre établissement en matière d'élimination des déchets médicaux.
Informations réglementaires	Australie – Répertoire dans TGA ARTG NO: 146821 Etats-Unis- Agrément de pré-commercialisation FDA 510(K) #K983367 comme conteneur pour objets tranchants Europe – Dispositif médical de Classe I conformément à la Directive du Conseil 93/42/EEC avec marquage CE

* Certains éléments peuvent ne pas être compatibles avec le BladeFLASK Qlicksmart

Utilisation du BladeFLASK

ÉLÉMENTS DE VOTRE BladeFLASK:

BORD COUPANT ORIENTÉ VERS LA DROITE

CET ÉLÉMENT EST APPELÉ SOIE ET DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE HAUT

INDICATEUR

COUSSINET

SUPPORT DE FIXATION

FIXER AU MUR OU SUR UN CHARIOT :

- Si vous n'avez pas monté votre BladeFLASK préalablement, préparez le support de montage*.
 - A LA BASE DU SUPPORT COMPORTE UN ADHÉSIF DOUBLE FACE
 - B OU UTILISER DES VIS.

* Voir le modèle d'adaptation et les instructions dans l'emballage du support.
- Le BladeFLASK peut être fixé au mur, sur un chariot ou à la table.

FAIRE GLISSER DANS LE SUPPORT

ENFONCER DANS LE SUPPORT

N.B: Monter BladeFLASK sur le support de montage pendant l'utilisation

EXTRAIRE LA LAME À UNE SEULE MAIN:

- Placer la lame sur le coussinet avec le bord coupant orienté vers la droite (ou « soie » vers le haut).
- Pousser le manche du scalpel dans le BladeFLASK jusqu'au clic.

CLIC!
- Extraire le manche.

N.B:
 * Étape 3 assurer l'enlèvement et inclusion de la lame dans le BladeFLASK.
 * BladeFLASK doit être utilisé avec le support de montage.
 * Le BladeFLASK est éliminé comme déchet médical après l'insertion de 100 lames

Qlicksmart Pty. Ltd.



Level 1, 148 Boundary Street,
West End, Brisbane,
QLD 4101, Australie



+61-7-3844-1182



+61-7-3844-1183



www.qlicksmart.com



hello@qlicksmart.com

Restez en contact



Distribué par:



CORMEDICA

Green Park - Immeuble A1
Rue Claude Chappe
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél : 04.74.94.34.43 - Email : info@cormedica.fr
www.cormedica.fr